

Marisol Sterile

Fiziološki, sterilni rastvor

Pojedinačne doze 5ml

Odvojiti pojedinačnu ampulu i otvoriti je uvrtnjem njenog gornjeg dela.

Higijena nosa

Kao kapi ili za ispiranje suvog ili zapušenog nosa.

Uputstvo za korišćenje:

Zabacite glavu unazad. Pažljivo ubacite vrh u jednu nozdrvu i lagano stisnite bočicu. Ponovite proces sa drugom nozdrvom. Ispravite glavu kako biste uklonili sluz i obrišite. Nemojte ništa žvakati 10 minutanakon aplikacije. Kod beba unesite kapi uz minimalni pritisak kako biste sprečili rizik od kontaminacije srednjeg uva.

Higijena očiju

Za vlaženje ili ispiranje očiju.

Uputstvo za korišćenje:

Ukapajte nekoliko kapi rastvora u svako oko, pri čemu pazite da bočica u kojoj se nalazi pojedinačna doza ne dođe u kontakt sa površinom oka. Obrišite višak tečnosti pomoću sterilne komprese. U slučaju lečenja oka, sačekajte 15 minuta pre primene rastvora.

Može se koristiti 1-6 puta dnevno, u zavisnosti od potrebe.

Koristite odvojene pojedinačne bočice sa dozama za nos i oči.