

Oto Perfect aqua acida

Sprej rastvor za uvo, 30 ml

Oto Perfect aqua acida sprej rastvor za uvo je medicinsko sredstvo koje sadrži acetatnu (sirćetnu) kiselinu, izopropil alkohol i d-pantenol. Koristi se za prevenciju i tretman nekomplikovanih infekcija spoljašnjeg ušnog kanala i kod zadržavanja vode u spoljašnjem ušnom kanalu. Svoje dejstvo ostvaruje snižavanjem pH vrednosti u spoljašnjem slušnom hodniku (čime se stvaraju nepovoljni uslovi za razvoj mikroorganizama), kao i zahvaljujući svom baktericidnom i antimikotičkom delovanju. Takođe, Oto Perfect aqua acida sprej rastvor za uvo je odličan izbor kod zadržavanja vode u uvu jer sadrži izopropil alkohol koji efikasno dovodi do uklanjanja viška zaostale vode koja oštećuje kožnu barijeru. D-pantenol u formulaciji regeneriše i štiti kožu spoljašnjeg ušnog kanala.

Upotreba Oto Perfect aqua acida sprej rastvora za uvo se preporučuje:

- Za tretman blagih i umerenih infekcija spoljašnjeg ušnog kanala bakterijskog i gljivičnog porekla (otitis externa - „plivačko uvo“, otomikoze)
- Preventivno kod plivača, ronilaca i osoba koje su sklone infekcijama spoljašnjeg ušnog kanala
- Kod zadržavanja vode u ušnom kanalu do kojeg dolazi nakon plivanja, ronjenja, tuširanja, boravka u uslovima vlažne i tople klime, neadekvatne upotrebe sredstava za čišćenje uva na bazi vode, pa čak i znojenja

Kako se upotrebljava Oto Perfect aqua acida sprej rastvor za uvo?

Pre prve upotrebe pritisnuti raspršivač par puta dok iz bočice ne počne da izlazi ravnomerna doza spreja. Nagnuti bočno glavu i ubrizgati jednu dozu Oto Perfect aqua acida sprej rastvora u uvo, vodeći računa da se aplikator samo blago prisloni na ušnu školjku. Ostaviti da deluje 5 minuta, držeći glavu blago nagnutu. Potom ispraviti glavu, pustiti da rastvor iscuri i nežno prebrisati uvo. Kod dece blago povući ušnu školjku unazad, pa onda ubrizgati proizvod.

Kod infekcija spoljašnjeg ušnog kanala („plivačkog uva“) ili prisustva vode u uvu, aplikovati po jednu dozu sprej rastvora (kod odraslih po potrebi i više) 3 puta na dan.

U prevenciji infekcija i zadržavanja vode u spoljašnjem ušnom kanalu, aplikovati po jednu dozu sprej rastvora u ušni kanal 2 – 3 puta nedeljno.

Prednosti primene Oto Perfect aqua acida sprej rastvora za uvo:

- ✓ Zahvaljujući sprej formi, preparat se može primenjivati u stojećem ili sedećem položaju, što omogućava komfornu primenu
- ✓ Sprej se ravnomerno dozira u slušni kanal



- ✓ Svaka doza obezbeđuje istu, tačno potrebnu količinu preparata
- ✓ Nije potrebno ispiranje uva nakon primene

Kada ne treba primenjivati Oto Perfect aqua acida sprej rastvor za uvo:

- u slučaju perforacije ili nedostatka bubne opne
- u slučaju postojanja povrede ušnog kanala
- u slučaju preosetljivosti na neki od sastojaka proizvoda
- kod dece ispod tri godine starosti

Upozorenja za bezbednu primenu Oto Perfect aqua acida sprej rastvora za uvo:

Oto Perfect aqua acida sprej rastvor za uvo nije lek. U slučaju pojave bola u uvu potražiti savet lekara.

Oto Perfect aqua acida sprej rastvor za uvo kod nekih osoba može dovesti do blage iritacije spoljašnjeg ušnog kanala. U slučaju pojave alergijske reakcije na ovaj proizvod, obustaviti primenu i potražiti savet lekara.

Savet:

Mehaničko čišćenje slušnog kanala (npr. štapićima sa vatom) se ne preporučuje jer može dovesti do nastanka mikropovreda koje se lako inficiraju u kontaktu sa kontaminiranom vodom ili prašinom.

Kako čuvati medicinsko sredstvo Oto Perfect aqua acida sprej rastvor za uvo:

Oto Perfect Aqua Clean sprej rastvor za uvo čuvati u originalnom pakovanju, na suvom i tamnom mestu, na temperaturi do 25°C. Bočicu čuvati u uspravnom položaju, čvrsto zatvorenu, van domašaja dece.

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 30 dana.

Pakovanje: Složiva kartonska kutija sa plastičnom sprej bočicom koja sadrži 30ml rastvora (oko 220 doza) i uputstvom za upotrebu medicinskog sredstva.

Šta sadrži medicinsko sredstvo Oto Perfect aqua acida sprej rastvor za uvo:

1 ml rastvora sadrži 433.97 mg izopropil alkohola, 22.83 mg sirćetne kiseline, 4.61 mg d-pantenola.

Rastvarač: prečišćena voda.

Sadrži konzervans: benzalkonijum hlorid 0.1 mg/ml.

Datum izdavanja uputstva za upotrebu medicinskog sredstva:
25.04.2019. godine

Broj rešenja o registraciji medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava: 515-02-00866-19-002 od 26.09.2019. godine

Proizvođač:

ESENSA d.o.o. Viline vode bb, Beograd, Republika Srbija

Distributer:

FARMALOGIST d.o.o. Beograd, Mirijeovski bulevar 3, tel: +381 11 33 15 090



www.esensa.rs