

Oto Perfect aqua clean

Sprej rastvor za uvo, 30 ml

Oto Perfect aqua clean sprej rastvor za uvo je medicinsko sredstvo formulirano na bazi vodonik peroksida. Koristi se za ispiranje ušnog kanala, omekšavanje i uklanjanje ušnog voska, kao i formiranog ceruminoznog čepa.

Vodonik peroksid u kontaktu sa kožom oslobađa nascentni kiseonik, izazivajući efervescenciju koja mehanički fragmentira ušni vosak (što se manifestuje kao „pucketanje u uhu“ i dokaz je efikasnosti preparata). Dodatno, oslobođeni nascentni kiseonik iz vodonik peroksida deluje antiseptično, što doprinosi prevenciji infekcija spoljašnjeg uva. Korišćenjem Oto Perfect aqua clean sprej rastvora za uvo, spoljašnji ušni kanal se čisti, uklanja se nelagodnost i smanjuje rizik od nastanka infekcije.

Upotreba Oto Perfect aqua clean sprej rastvora za uvo se preporučuje:

- Za održavanje higijene uva
- Kod osoba sa prirodnom sklonošću ka prekomernom stvaranju cerumena
- Za uklanjanje formiranog ceruminoznog čepa
- Kod osoba koje nose slušne aparate ili često nose slušalice
- Za ispiranje uva neposredno pre primene lekova za aurikularnu primenu

Kako se upotrebljava Oto Perfect aqua clean sprej rastvor za uvo?

Pre prve upotrebe pritisnuti raspršivač par puta dok iz bočice ne počne da izlazi ravnomerna doza spreja. Sprej bočicu zagrejati držanjem u šaci (1 minut). Nagnuti bočno glavu i ubrizgati jednu dozu Oto Perfect aqua clean sprej rastvora u uvo, vodeći računa da se aplikator samo blago pristoni na ušnu školjku. Ostaviti da deluje 5 minuta, držeći glavu blago nagnutu. Potom ispraviti glavu, pustiti da rastvor iscure i nežno prebrisati uvo. Kod dece blago povući ušnu školjku unazad, pa onda ubrizgati proizvod. Za održavanje higijene uva, odnosno, u prevenciji nagomilavanja cerumena u spoljašnjem ušnom kanalu, sprej aplikovati 2 – 3 puta nedeljno. Osobe koje nose slušne aparate postupak mogu ponavljati i češće (više puta nedeljno). Kod formiranog ceruminoznog čepa, aplikovati jednu dozu sprej rastvora (kod odraslih po potrebi i više) i ostaviti da deluje 10 minuta, držeći glavu blago nagnutu. Po potrebi ponoviti postupak.



Prednosti primene Oto Perfect aqua clean sprej rastvora za uvo:

- ✓ Zahvaljujući sprej formi, preparat se može primenjivati u stojećem ili sedećem položaju, što omogućava komfornu primenu
- ✓ Sprej se ravnomerno dozira u slušni kanal
- ✓ Nije potrebno ispiranje uva nakon primene

Kada ne treba primenjivati Oto Perfect aqua clean sprej rastvor za uvo:

- u slučaju perforacije ili nedostatka bubne opne
- u slučaju postojanja povrede ušnog kanala
- u slučaju preosetljivosti na vodonik peroksid ili bilo koji od sastojaka proizvoda
- u slučaju postojanja stranog tela u uvu
- pre i nakon hirurških intervencija
- kod dece ispod tri godine starosti

Upozorenja za bezbednu primenu Oto Perfect aqua clean sprej rastvora za uvo:

Oto Perfect aqua clean sprej rastvor za uvo nije lek. U slučaju pojave bola u uvu potražiti savet lekara.

Oto Perfect aqua clean sprej rastvor za uvo kod nekih osoba može dovesti do blage iritacije spoljašnjeg ušnog kanala u vidu prolaznog osećaja blagog peckanja, svraba ili crvenila kože. U slučaju pojave alergijske reakcije na ovaj proizvod, obustaviti primenu i potražiti savet lekara.

Savet:

Mehaničko čišćenje slušnog kanala (npr. štapićima sa vatom) se ne preporučuje jer može dovesti do nastanka mikropovreda koje se lako inficiraju u kontaktu sa kontaminiranom vodom ili prašinom.

Kako čuvati medicinsko sredstvo Oto Perfect aqua clean sprej rastvor za uvo:

Oto Perfect aqua clean sprej rastvor za uvo čuvati u originalnom pakovanju, na suvom i tamnom mestu, na temperaturi do 25°C. Bočicu čuvati u uspravnom položaju, čvrsto zatvorenu, van domašaja dece.

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 30 dana.

Pakovanje: Složiva kartonska kutija sa plastičnom sprej bočicom koja sadrži 30ml rastvora (oko 220 doza) i uputstvom za upotrebu medicinskog sredstva.

Šta sadrži medicinsko sredstvo Oto Perfect aqua clean sprej rastvor za uvo:

Sadržaj aktivnih supstanci: 1 mL spreja sadrži 30 mg stabilizovanog vodonik peroksida. Rastvarač: prečišćena voda

Ostali proizvodi iz kolekcije Oto: Oto Perfect olive oil sprej rastvor za uvo, Oto Perfect aqua acida sprej rastvor za uvo, Oto CeruClean sprej gel za uvo.

Datum izdavanja uputstva za upotrebu medicinskog sredstva:

10.06.2019. godine

Broj rešenja o registraciji medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava:

515-02-00865-19-003 od 08.08.2019. godine

Proizvođač:

ESENSA d.o.o. Viline vode bb, Beograd, Republika Srbija

Distributer:

FARMALOGIST d.o.o. Beograd, Mirijevski bulevar 3, tel: +381 11 33 15 090

