

Oto Perfect olive oil

Sprej rastvor za uvo, 30 ml

Oto Perfect olive oil sprej rastvor za uvo je medicinsko sredstvo formulirano na bazi maslinovog ulja farmaceutske čistoće koje omekšava cerumen i olakšava njegovo uklanjanje. Upotreba Oto Perfect olive oil sprej rastvora za uvo predstavlja jednostavan i prirodan način za omekšavanje i uklanjanje ušnog voska, čime se smanjuje potreba za čišćenjem uva ispiranjem.

Oto Perfect olive oil sprej rastvor za uvo u svom sastavu sadrži i ulja čajevca i nane koja ispoljavaju antimikrobno i antiinflamatorno dejstvo, kao i vitamine A i E koji stimuliraju epitelizaciju iritiranih delova ušnog kanala.

Upotreba Oto Perfect olive oil sprej rastvora za uvo se preporučuje:

- Za održavanje higijene uva
- Osobama sa prirodnom sklonošću ka prekomernom stvaranju cerumena
- Za uklanjanje formiranog ceruminoznog čepa
- Osobama koje nose slušne aparate ili često koriste slušalice

Kako se upotrebljava Oto Perfect olive oil sprej rastvor za uvo?

Pre prve upotrebe pritisnuti raspršivač par puta dok iz bočice ne počne da izlazi ravnomerna doza spreja. Sprej bočicu zagrejati držanjem u šaci (1 minut). Nagnuti bočno glavu i ubrizgati jednu dozu Oto Perfect olive oil sprej rastvora u uvo, vodeći računa da se aplikator samo blago priloni na ušnu školjku. Ostaviti da deluje 5 minuta, držeći glavu blago nagnutu. Potom ispraviti glavu, pustiti da rastvor iscure i nežno prebrisati uvo. Kod dece blago povući ušnu školjku unazad, pa onda ubrizgati proizvod. Za održavanje higijene uva, odnosno, u prevenciji nagomilavanja cerumena u spoljašnjem ušnom kanalu, sprej aplikovati 2 – 3 puta nedeljno. Osobe koje nose slušne aparate postupak mogu ponavljati i češće (više puta nedeljno).

Kod formiranog ceruminoznog čepa, aplikovati jednu dozu sprej rastvora (kod odraslih po potrebi i više) i ostaviti da deluje 10 minuta, držeći glavu blago nagnutu. Po potrebi ponoviti postupak.



Prednosti primene Oto Perfect olive oil sprej rastvora za uvo:

- ✓ Zahvaljujući sprej formi, preparat se može primenjivati u stojećem ili sedećem položaju, što omogućava komfornu primenu
- ✓ Sprej se ravnomerno dozira u slušni kanal
- ✓ Nije potrebno ispiranje uva nakon primene

Kada ne treba primenjivati Oto Perfect olive oil sprej rastvor za uvo:

- u slučaju perforacije ili nedostatka bubne opne
- u slučaju postojanja povrede ušnog kanala
- u slučaju preosetljivosti na neki od sastojaka proizvoda
- u slučaju postojanja stranog tela u uvu
- pre i nakon hirurških intervencija
- kod dece ispod tri godine starosti

Upozorenja za bezbednu primenu Oto Perfect olive oil sprej rastvora za uvo:

Oto Perfect olive oil sprej rastvor za uvo nije lek. U slučaju pojave bola u uvu potražiti savet lekara.

U slučaju pojave alergijske reakcije na ovaj proizvod, obustaviti primenu i potražiti savet lekara.

Savet:

Mehaničko čišćenje slušnog kanala (npr. štapićima sa vatom) se ne preporučuje jer može dovesti do nastanka mikropovreda koje se lako inficiraju u kontaktu sa kontaminiranom vodom ili prašinom.

Kako čuvati medicinsko sredstvo Oto Perfect olive oil sprej rastvor za uvo:

Oto Perfect olive oil sprej rastvor za uvo čuvati u originalnom pakovanju, na suvom i tamnom mestu, na temperaturi do 25°C. Bočicu čuvati u uspravnom položaju, čvrsto zatvorenu, van domašaja dece.

Rok upotrebe: 3 godine.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 30 dana.

Pakovanje: Složiva kartonska kutija sa plastičnom sprej bočicom koja sadrži 30ml rastvora (oko 220 doza) i uputstvom za upotrebu medicinskog sredstva.

Šta sadrži medicinsko sredstvo Oto Perfect olive oil sprej rastvor za uvo:

Sadržaj aktivnih supstanci:

1 mL rastvora sadrži 174 mg maslinovog ulja; 4,35 mg retinol palmitata (vitamin A); 4,35 mg tokoferol acetata (vitamin E); 4,35 mg etarskog ulja nane (*Mentha piperita*) i 0,43 mg ulja čajevca (*Melaleuca alternifolia oil*).

Ostali proizvodi iz kolekcije Oto: *Oto Perfect aqua clean sprej rastvor za uvo*, *Oto Perfect aqua acida sprej rastvor za uvo*, *Oto CeruClean sprej gel za uvo*.

Datum izdavanja uputstva za upotrebu medicinskog sredstva:

jun 2020. godine

Broj rešenja o registraciji medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava:

515-02-00867-19-002 od 22.05.2019. godine

Proizvođač:

ESENSA d.o.o. Viline vode bb, Beograd, Republika Srbija

Distributer:

FARMALOGIST d.o.o. Beograd, Mirijeovski bulevar 3, tel: +381 11 33 15 090

