

Marisol fresh спреј раствор за нос 50 ml е (изотоничен раствор на морска сол со етерско масло на еукалиптус)

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПОТРЕБА

Почитувани пациенти,

Ве молиме пред употреба внимателно да го прочитате ова упатство, бидејќи тоа содржи битни информации за употреба на медицинското средство Marisol fresh спреј. После читањето, упатството немојте да го фрлате, бидејќи можеби некои податоци повторно ќе сакате да ги прочитате. Доколку имате нејаснотии или Ви се потребни дополнителни информации за ова медицинско средство, обратете се кај Вашиот лекар или фармацевт.

Состав:

1мл спреј содржи 9 мг морска сол, 1.2 мг етарско масло од еукалиптус.
Растворувач: пречистена вода, помошна материја полисорбат 20, дисодиум ЕДТА, ди натриум хидроген фосфат анх. , натриум дихидроген фосфат анх.
Содржи конзерванс: бензалкониум хлорид 0.1мг/мл.

Кога делува и за кого е наменет Marisol fresh спреј?

Marisol fresh спреј раствор за нос е изотоничен раствор на морска сол збогатен со етерско масло на еукалиптус. Наменет е за лица со отежната физиолошка функција на носната слузокожа, како и за одржување на секојдневна хигиена на носните канали. Marisol fresh растворот ја враќа природната влажност на носната слузокожа, способноста за самопочистување и нормална продукција на слуз која ја штити од сушење и механички дразби (чад, прашина, итн). Подобрува проодност и олеснува циркулирање на воздух низ горните дишни патишта, што е особено корисно при настинка, грип и проблеми со синуси. Растворот е збогатен со етерско масло на еукалиптус кое делува антисептично, ублажува оток на носната слузокожа и помага кај инфекции на горните дишни патишта.

Кога се користи Marisol fresh спреј?

- кај лица со непроодни дишни патишта, вирусни настинки и кивавица од алергиско потекло (алергиски ринитис)
- за секојдневна хигиена на носот
- кај запушен нос
- кај воспалени синуси (хроничен синуситис)
- кај сува и надразнета слузокожа чија нормална физиолошка функција е пореметена
- кај акутно воспаление на носната слузокожа
- кај лица кои се склони на исушување на слузокожата на дишните патишта, во текот на патување и престој во простории со централно греење и клима уреди

Како се употребува Marisol fresh спреј?

Возрасни и деца над 6 години: 2-3 пати дневно 1-2 вбризувања во секоја ноздрва.

Пред првата употреба одстранете го заштитниот прстен од пластичниот распрскувач. Шишето држете го во вертикална положба. Одстранете го заштитниот поклопец и неколку пати притиснете ја пумпата додека не излезе првиот млаз на спреј. Врвот на носната пумпа вовлечете го во ноздрва, а потоа притиснете ја пумпата. При тоа, шишето држете го исправено, а главата не ја навалувајте назад. За време на распрснувањето на спрејот полека вдишете преку нос. После користењето, врвот на пумпата исперете го со млаз чиста вода. Вратете го заштитниот поклопец.

Што уште треба да знаете за Marisol fresh спреј и кога не треба да се користи?

Marisol fresh спреј има одлична подносливост, не ја оштетува слузокожата на носната шуплина.

При препорачаната употреба на Marisol fresh спреј не се очекуваат несакани ефекти.

Не постојат посебни мерки на претпазливост за користење на Marisol fresh спреј.

Не се препорачува примена на Marisol fresh спреј во текот на бременост и доење.

Marisol fresh спреј може да го користат деца постари од 6 години и возрасни.

Сепак, во ретки случаи кај преосетливи лица можна е алергиска реакција. Реакцијата е блага и по правило се повлекува по престанокот од употреба на препаратот.

Сега вратете се на составот на Marisol fresh спреј и уште еднаш прочитајте го.

Доколку знаете дека сте алергични на некои од состојките во Marisol fresh спреј, немојте да го употребувате.

Доколку во текот на примената се јави алергиска реакција (оток, пецкање, болка, отежнато дишење преку нос), немојте да кревате паника. Прекинете со употреба на Marisol fresh спреј и обратете се кај вашиот лекар или фармацевт.

Прочитајте го и ова:

Не голтајте.

Деца не би требало да го користат препаратот без надзор на возрасен.

Од хигиенски причини секое лице би требало да има свое шише.

Производот користете го само во оригинално пакување.

Не го употребувајте производот после рок на употреба, означен на амбалажата.

Неправилната употреба може да има штетни последици.

Чување:

Чувајте на температура до 25° С. Вон дофат на деца.

Рок на употреба:

2 години од датумот на производство.

После првото отварање производот може да се користи најдолго шест недели.

Пакување:

Пластично шише со 50 ml раствор и дозирна назална пумпа.

Број на решение за запис на медицинското средство во Регистарот за медицински средства : Реф бр.11-3368/2-15 од 24.04.2015г.

Произведувач:

Есенса д.о.о.

Слободна зона Белград

Вилине воде бб

www.esensa.rs

Увозник и дистрибутер:

Септима д.о.о.е.л.

Сава Ковачевиќ 13 бр.9 Скопје тел. 02 30 60 175