

MARISOL[®] *in* ectoin gel

zaštita nosa od alergena 20ml

Sastojci (INCI):

Glycerin, Aqua, Ectoin, Carbomer, Triethanolamine, CI 45380

Bez parabena

Kako deluje Marisol in ectoin gel?

Formulisan na bazi ektoina, na siguran i efikasan način vlaži sluzokožu nosa, ublažava simptome alergijskog rinitisa i štiti nosnu sluzokožu od alergena iz spoljašnje sredine. **Ektoin** je jedinjenje koje se u prirodi sintetiše od strane mikroorganizama, kojim oni obezbeđuju svoj opstanak u ekstremnim uslovima spoljašnje sredine (visoka temperatura, visok salinitet, UV zračenje). Najviše ga ima u tzv. halofilnim bakterijama, vrsti ekstremofila koje uspevaju u uslovima izuzetno visokog saliniteta. U osnovi, ektoin je osmoprotektor (eng. compatible solute – mali molekuli koji se ponašaju kao osmoliti odn. jedinjenja koja utiču na osmozu). Ektoin kao mali molekul, aminokiselinski derivat, ima sposobnost stabilizacije intermolekulskih interakcija u vitalnim molekulima kao što su proteini i lipidi. To praktično znači da ektoin okružuje svoju molekulu, ali i okolne lipidne i proteinske strukture slojem vode i gradi tzv. Ectoin hydro complex. Ovo su veoma stabilne strukture, ojačane vodoničnim vezama između molekula vode u površinskom sloju, koje formiranjem hidrofila na samoj površini kože/sluznica sprečavaju penetraciju čestica iz okruženja, uključujući i alergene i samim tim izostaju kaskadne reakcije preosetljivosti, odnosno manifestacije alergijskog rinitisa.

Kada se preporučuje Marisol in ectoin gel?

- in* kod suve i nadražene sluzokože nosa čija je normalna fiziološka funkcija otežana
- in* za svakodnevnu higijenu nosa, posebno u sezoni alergija, ali i preventivno
- in* za ublažavanje simptoma alergijskog rinitisa i rinokonjuktivitisa
- in* tokom putovanja i boravka u prostorijama sa centralnim grejanjem i klima uređajima
- in* spolja, za regeneraciju i ublažavanje crvenila kože u predelu oko nosa
- in* u toku primene intranazalnih kortikosteroida, kako bi se sprečilo oštećenje nazalne sluznice isušivanjem

Kome se preporučuje upotreba Marisol in ectoin gela?

Proizvod mogu koristiti deca starija od godinu dana i odrasle osobe.

Kako se upotrebljava Marisol in ectoin gel?

Preporučuje se nanošenje gela na sluzokožu nosa tri do pet puta dnevno, u obe nozdrve.

Odrasli: Vrh tube nežno uvući u nozdrvu koliko je moguće, istisnuti malu količinu gela, a zatim blagim kružnim pritiskom spoljašnje površine nosa omogućiti raspoređivanje gela po nosnoj sluzokoži. Nakon upotrebe, mlakom vodom očistiti vrh tube.

Deca: Istisnuti gel na štapić od vate, a zatim ga oprezno uvući u nosnu šupljinu i na taj način naneti gel na sluzokožu.

Spolja: na vrh prsta istisnuti malu količinu gela i kružnim pokretima utrljati ga na kožu u predelu nosa i nosnih šupljina.

Iz higijenskih razloga svaka osoba bi trebalo da ima svoju tubu.

Napomene: Ne preporučuje se primena u slučaju preosetljivosti (alergije) na neki od sastojaka proizvoda.

Način čuvanja: Čuvati na temperaturi do 25°C, van domašaja dece.

Rok upotrebe: 3 godine.

Pakovanje: Tuba sa 20ml gela.

Proizvođač: Esensa d.o.o.
Slobodna Zona Beograd,
Viline vode bb, Republika Srbija
www.esensa.rs

Medicinski marketing:

Tel: +381 11 2070 965

e-mail: marketing@esensa.co.rs

Informacije možete dobiti besplatnim pozivom na broj:
0800 200 300 (samo za pozive iz Srbije) ili putem
e-mail-a: informacije@connectura.rs

