

INFORMACIJE O UPOTREBI

Poštovani, pacijenti, molimo Vas da pre upotrebe pažljivo pročitate ovo uputstvo, jer ono sadrži za Vas važne informacije o upotrebi medicinskog sredstva Marisol. Nakon čitanja, uputstvo nemojte bacati, jer ćete možda poželeti da neke podatke ponovo pročitate. Ukoliko imate nejasnoća ili su Vam potrebne dodatne informacije o ovom medicinskom sredstvu, obratite se lekaru ili farmaceutu.

Sastav: 1 ml spreja sadrži 9 mg morske soli. Rastvarač: prečišćena voda.

Sadrži konzervans: benzalkonijum hlorid 0.1 mg/ml.

Kada deluje i kome je namenjen Marisol isotonic sprej?

Marisol isotonic sprej rastvor za nos je izotoničan rastvor morske soli. Namenjen je osobama kod kojih je poremećena normalna fiziološka funkcija nosne sluzokože kao i održavanju svakodnevne higijene nosnih šupljina. Marisol isotonic rastvor vraća sluzokoži nosa njenu prirodnu vlažnost, sposobnost samoprečišćavanja i normalne produkcije sluzi koja je štiti od isušivanja i mehaničkih nadražaja (dima, prašine, itd.). Redovnim ispiranjem nosne šupljine, nekoliko puta dnevno, smanjuje se mogućnost infekcije gornjih disajnih puteva.

Kada koristiti Marisol isotonic sprej?

- za svakodnevnu higijenu nosa
- kod osoba sa neprohodnim disajnim putevima, virusnih prehlada i kijavica alergijskog porekla
- kod suve i nadražene sluzokože čija je normalna fiziološka funkcija poremećena
- kod osoba koje su sklone isušivanju sluzokože disajnih puteva
- tokom putovanja i boravka u prostorijama sa centralnim grejanjem i klima uređajima
- neposredno pre upotrebe kapi za nos, kako bi se isprala nosna šupljina i omogućio bolji kontakt leka sa nosnom sluzokožom

Kako se Marisol isotonic upotrebljava?

U svaku nozdrvnu ubrizgati po jednu dozu rastvora, nekoliko puta dnevno. Pre upotrebe skinuti zaštitni poklopac. Bočicu držati u vertikalnom položaju. Zatim nekoliko puta pritisnuti pumpicu dok ne izađe prvi mlaz spreja. Vrh nazalne pumpice uvući u nozdrvnu, a zatim pritisnuti pumpni mehanizam. Pri tome bočicu držati uspravno, a glavu ne naginjati unazad. Za vreme rasprskavanja spreja lagano udahnuti kroz nos. Nakon korišćenja vrh pumpice isprati mlazom čiste vode. Vratiti zaštitni poklopac.

Šta još morate znati o Marisol isotonic spreju i kada ga ne treba koristiti?

Marisol isotonic sprej po sastavu i koncentraciji i pH vrednosti odgovara fiziološkim vrednostima. Zbog ovakvih karakteristika Marisol isotonic sprej ima odličnu podnošljivost (ne pecka i ne iritira nosnu sluzokožu čak ni kada je pod upalom - tada je nosna sluzokoža posebno osetljiva). Pri preporučenoj upotrebi Marisol isotonic spreja ne očekuju se neželjeni efekti.

Ne postoje posebne mere opreza za korišćenje Marisol isotonic spreja.

Nema dostupnih podataka o štetnosti primene Marisol isotonic spreja u toku trudnoće i dojenja.

Marisol isotonic sprej mogu koristiti i deca i odrasli. Ipak, u retkim slučajevima kod preosetljivih osoba moguće su alergijske reakcije.

Reakcije su blage i po pravilu se povlače po prestanku upotrebe preparata.

Sada se vratite na sastav Marisol isotonic spreja i još jednom ga pročitate.

Ukoliko znate da ste alergični na neki od sastojaka Marisol isotonic spreja, nemojte ga upotrebljavati.

Ukoliko se u toku primene javi alergijska reakcija (otok, peckanje, bol, otežano disanje kroz nos), nemojte paničiti.

Prekinite upotrebu Marisol isotonic spreja i obavestite lekara ili farmaceuta.

Pročitajte i ovo:

Ne gutati. Deca ne bi trebalo da koriste preparat bez nadzora odraslih. Iz higijenskih razloga svaka osoba bi trebalo da ima svoju bočicu.

Proizvod koristite samo u originalnom pakovanju.

Ne koristite proizvod nakon isteka roka upotrebe, označenog na pakovanju.

Nepravilna upotreba može imati štetne posledice.

Čuvanje: Čuvati na temperaturi do 25°C. Van domašaja dece.

Rok upotrebe: 3 godine od datuma proizvodnje.

Nakon prvog otvaranja proizvod se sme koristiti najduže šest nedelja.

Pakovanje: Plastična boca sa 50 ml rastvora i dozirnomo nazal pumpicom.

Broj rešenja o upisu medicinskog sredstva u


Registar medicinskih sredstava: 515-02-00318-15-001 od 27.04.2015.

Proizvođač i nosilac upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava:

ESENSA d.o.o. Slobodna Zona Beograd, Viline vode bb, Republika Srbija, www.esensa.rs

Distributer: FARMALOGIST d.o.o. Beograd,

Mirijevski bulevar 3, tel: +381 11 33 15 090

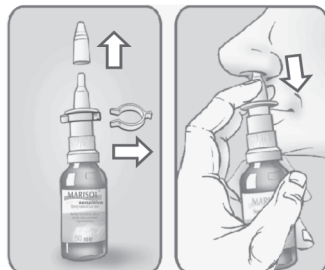

Datum poslednje revizije uputstva za upotrebu medicinskog sredstva: 10.10.2014.