

MultiClean sprej za dezinfekciju ušne duplje i aparata

INCI/Sastojci/Ingredients/Cosťas/Pérberésit:

Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Hydrogen Peroxide, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Disodium EDTA, Limonene.

SRB MNE BIH

Oto Prevent MultiClean sprej je višenamensko sredstvo za održavanje higijene uva, ali i površinsku negu, odnosno, čišćenje i dezinfekciju slušalica za mobilni telefon, bluetooth slušalica, slušnih pomagala i slično.

Oto Prevent MultiClean sprej pruža pouzdanu zaštitu od bakterija i glijavica i smanjuje rizik od nastanka infekcije i upale u uhu. Održavanje redovne i adekvatne higijene ušiju i slušalica/slušnih aparata je najbolji način da se sačuva zdravlje ušiju, ali i pročišćenje veka trajanja slušalica ili slušnih aparata.

Kako se koristi Oto Prevent MultiClean sprej?

1. Za održavanje higijene uva:

Oto Prevent MultiClean sprej sadrži vodonik peroksid koji u kontaktu sa kožom oslobađa nascentni kiseonik, izazivajući efervesenciju koja mehanički fragmentira ušni vosak (što se manifestuje kao „pucketanje u uhu“ i dokaz je efikasnosti preparata). Dodatno, oslobodenii nascentni kiseonik iz vodonika peroksida deluje antiseptično, što doprinosi prevenciji infekcija spojilašnjeg uva. Ulje čajevca ispoljava antimikrobično i antiinflamatorno dejstvo na mestu primene, sprečavajući razvoj i širenje infekcija.

Način upotrebe:

Pre prve upotrebe pritisniti raspršivač par puta dok iz boćice ne počne da izlazi ravnomerna doza spreja.

Sprej boćicu zagrejati držanjem u šaci (1 minut). Nagnuti bočno glavu i ubrizgati jednu dozu Oto Prevent MultiClean spreja u uvo, vodeći računa da se aplikator samo blago prisloni na ušnu školjku. Ostaviti da deluje par minuta, držeći glavu blago nagnutu.

Potom ispraviti glavu, pustiti da rastvor isciuri i nežno prebrisati uvo svom maramicom.

Oto Prevent MultiClean sprej aplikativi u uvo 2-3 puta nedeljno. Po potrebi, postupak se može ponavljati i češće.

Savet: Mehaničko čišćenje slušnog kanala (npr. štapicima sa vatrom) se ne preporучuje jer može dovesti do nastanka mikropovreda koje se lako inficiraju u kontaktu sa kontaminiranim vodom ili prašinom.

2. Za čišćenje i dezinfekciju slušalica/slušnih pomagala:

Oto Prevent MultiClean sprej efikasno uklanja cerumen i druge nečistoće sa slušalica i slušnih aparata, ostavljajući prijatan miris.

Održavanje higijene slušalica je veoma važno jer se na njima nalazi cerumen pomešan sa celijama kože i sitnim česticama prijavštine, što predstavlja opasnost od nastanka infekcije ušiju.

Jedan par slušalica treba da koristi samo jedna osoba, kako bi se smanjio rizik od širenja infekcija.

Osim toga, nepravilna higijena slušalica utiče na kvalitet zvuka. Za održavanje adekvatne higijene, kao i postizanja snažnog i izražajnog zvuka, preporučujemo konšćenje Oto Prevent MultiClean spreja najmanje jednom nedeljno.

Kod slušnih aparata, cerumen može blokirati izlaz zvuka ili otvor za ventilaciju slušnih aparata, što rezultira slabim, prigušenim, izobiljenim zvukom ili potpunim odsustvom zvuka. Oto Prevent MultiClean sprej možete koristiti svako veče za površinsko čišćenje slušnih aparata.

Način upotrebe:

1. Ukloniti sunderaste, silikonske, gumene ili delove od memorijeske pene sa slušalicama/slušnim aparata (ukoliko postoje), oprati ih mlakom vodom i sapunom i ostaviti da se osuše.

2. Sa slušalicama/slušnim pomagala provi mehanički ukloniti vidljive nečistoće - obrisati ih svom mekanom krpicom ili papirnom maramicom.

3. Oto Prevent MultiClean sprej naprskati na čistu i suvu mekanu krpicu ili papirnu maramicu i njom nežno prebrisati površinu slušalice/slušnog aparata. Ne prskati sprej direktno na slušalice i slušne apeare.

4. Kada čistite slušalice, naprskajte Oto Prevent MultiClean sprej na četkicu sa mekim vlaknima (kao što je npr. meka četkica za zube), otresevi višak rastvora i očistite slušalice držeći četkicu pod pravim ugлом u odnosu na površinu koju čistite.

Kako bi se izbegao ulazak tečnosti i nečistoće u same slušalice, tokom čišćenja ih uvek držite u položaju sa zvučnicima okrenutim na dole i čistite četkicom potezima samo u jednom smeru.

5. Ostaviti slušalice da se suše oko 12 h nakon uklanjanja na dole, na svom i tamnom mestu (izbegavati ulažne prostorije poput kuhinje). Nakon tog perioda, možete u cilju uklanjanja eventualnog zaostalog kapljica pojačati ton na maksimum i pustiti ih nekoliko sekundi da rade tako, gde jačina tona fizički izbacuje mikrokapljice tečnosti.

Za čišćenje slušnih aparata koristite specijalnu četkicu za čišćenje slušnih aparata.

Savet: Slušalice i slušne apeare nikada ne čuvati u ulažnim prostorijama ili na veoma niskim ili visokim temperaturama.

Napomene:

Ne koristiti proizvod u slučaju perforacije ili nedostatka bubre opne, povrede ušnog kanala, preosetljivosti na vodonik peroksid, ulje čajevca ili bilo koji od sastojaka proizvoda, stranog tečila u uvu, pre i nakon hirurških intervencija i kod dece ispod tri godine starosti.

Način čuvanja: Čuvati u originalnom pakovanju, na svom i tamnom mestu, na temperaturi do 25°C.

Boćicu čuvati u uspravnom položaju, čvrsto zatvorenu, van domaća dece.

Rok upotrebe: 2 godine. Datum proizvodnje i serijski broj odštampani su na pakovanju.

Nakon prvog otvaranja, sadržaj iskoristiti u roku od 30 dana.

Pakovanje: Plastična sprej boćica sa 30 ml rastvora (oko 220 doza).

Ostali proizvodi iz kolekcije Oto: Oto aqua clean sprej rastvor za uvo,

Oto aqua acida sprej rastvor za uvo, Oto olive sprej rastvor za uvo i Oto CeruClean sprej gel za uvo.

Proizvodač: ESENSA d.o.o., Viline vode bb, Beograd, Republika Srbija

Medicinski marketing: tel: +381 11 2070 965, e-mail: marketing@esensa.rs

Informacije možete dobiti besplatnim pozivom iz Srbije na broj:

0800 200 300 ili putem e-mail-a: informacije@esensa.rs