

HyaloVag Balance

Uspostavlja prirodnu ravnotežu

7 patrona

Sastojci/Ingredients: Hydrogenated Coco-Glycerides, Cera Alba, Calendula Officinalis Oil, Tocopheryl Acetate, Sodium Hyaluronate

SRB MNE BIH

HyaloVag Balance patrone su formulisane na bazi natrijum hijaluronata, soli hijaluronske kiseline, koja lokalno primenjena brzo i delotvorno ublažava osećaj vaginalne suvoće i doprinosi održavanju fiziološkog nivoa hidratacije na mestu primene.

Hijaluronska kiselina omogućava ćelijama da zadrže vlagu, formirajući prirodnji film koji održava tkiva adekvatno hidriranim. S obzirom na to da molekuli hijaluronske kiseline imaju potencijal da vežu veoma veliku količinu vode, i do 1000 puta veću od svoje težine, nivo hidratacije koji se može postići lokalnom primenom je veoma značajan.

Hijaluronska kiselina je glikozaminoglikan koji se prirodno nalazi u telu, odnosno, organizam je sam proizvodi. Međutim, količina hijaluronske kiseline u organizmu opada starenjem, pri čemu se ovaj pad značajno manifestuje nakon 40. godine.

Kod žena u periodu menopauze usled pada nivoa estrogena dolazi do vaginalne atrofije koja se, između ostalog, manifestuje i osećajem suvoće, svrabom, peckanjem, crvenilom i nelagodnošću ili bolom tokom odnosa.

Međutim, i kod mlađih žena se mogu javiti simptomi vaginalne suvoće (npr. usled različitih poremećaja hormonske ravnoteže). Pored toga, hemoterapija, zračenje, neki lekovi, pa čak i stres, mogu da uzrokuju suvoću vagine kao sporedne efekte.

Nelagodnost nastala ovim promenama može biti značajno ublažena efektima hijaluronske kiseline koja doprinosi normalizaciji vlažnosti tkiva i ublažava simptome izazvane suvoćom intimne regije (vaginalna suvoća, pekanje, svrab, manje povrede i nelagodnost ili bol tokom odnosa). U vaginalnom okruženju, hijaluronska kiselina formira zaštitni gel koji trenutno štiti i vlaži sluznicu i ubrzava prirođeni proces njene regeneracije.

HyaloVag Balance patrone brzo i dugotrajno ublažavaju simptome vaginalne suvoće povećavajući vlažnost i elastičnost vaginalne mukoze.

Način upotrebe: Aplikovati jednu patronu lokalno, najbolje uveče pred spavanje, u ležećem položaju, u trajanju od 7 do 14 dana. Nakon tog perioda, aplikovati jednu patronu 2 – 3 puta nedeljno u cilju održavanja postignutog poboljšanja.

Napomene: Samo za spoljašnju upotrebu. Čuvati van domaća dece. Ne preporučuje se primena kod osoba preosetljivih na neki od sastojaka proizvoda.

Način čuvanja: Čuvati na suvom i tamnom mestu, na temperaturi do 25°C.

Rok upotrebe: 3 godine. Datum proizvodnje je odštampan na kutiji.

Pakovanje: Kutija sa 7 patrona

Proizvođač: Esensa d.o.o.,
Viline vode bb, Beograd, Republika Srbija
www.esensa.rs

Medicinski marketing:

Informacije možete dobiti besplatnim pozivom
iz Srbije na broj: 0800 200 300 ili putem
e-maila: informacije@esensa.rs



www.esensa.rs

